



MANUALE D'USO

**SBI MOTUS
SBI FRAME
SBI W-HEEL**

AVVERTENZE E PRECAUZIONI

1. IL PRODOTTO

La ditta Optima Molliter S.r.l. dichiara che i tutori SBI Motus, SBI Frame e SBI W-Heel sono presidi medici concepiti e progettati secondo lo stato dell'arte, sono stati controllati e resi conformi alla Direttiva 93/42 CEE per le parti applicabili. Nonostante ciò, è importante considerare che un uso non idoneo e la sottovalutazione dei pericoli che può comportare, possono essere causa di infortuni o danni. Prima di utilizzare SBI Motus, SBI Frame e SBI W-Heel leggere attentamente ed in modo completo le seguenti istruzioni. La corretta applicazione è essenziale per l'efficace funzionamento del dispositivo. Controllare frequentemente se sulla pelle si manifestano punti caldi e/o irritazioni. Se si vedono cambiamenti della pelle o si sentono fastidi, riposizionare i sistemi di fissaggio a velcro. Non utilizzare i dispositivi se sussiste una mancanza di sensibilità dovuta a situazioni post anestesia. Proteggere sempre gamba e piede con l'apposita calza in dotazione con SBI Motus, SBI Frame e SBI W-Heel (**Protective Sock**). Fare estrema attenzione quando si cammina su superfici scivolose o bagnate. Non camminare mai senza la suola del tutore.

1.1 PER UN USO CORRETTO

• Il prodotto va rilasciato e utilizzato solo dietro prescrizione medica o dietro indicazione di un operatore sanitario abilitato.

I plantari multistrato **KIT 3*3** (di serie su **SBI Motus** e **SBI W-Heel**), il plantare monoblocco (di serie su **SBI Frame**) o il plantare **PLTM** vanno manipolati esclusivamente da personale specializzato (medico o operatore sanitario abilitato).

- Seguire le istruzioni per la pulizia e la conservazione;
- Nel piede controlaterale NON lesionato è suggeribile indossare una calzatura protettiva con un'altezza della suola non inferiore ai 3 cm
- Porre estrema attenzione in caso di deambulazione in presenza di liquidi o sostanze scivolose;
- Evitare pratiche che facciano del prodotto un utensile o un oggetto di giochi;
- È sconsigliata la guida di automezzi durante l'utilizzo di SBI Motus, SBI Frame e SBI W-Heel;
- Non avvicinare il prodotto a fiamme o fonti di calore eccessivo;
- Assicursi che tutte le chiusure siano saldamente ancorate prima dell'utilizzo e della deambulazione.
- Assicursi che la suola sia saldamente ancorata prima dell'utilizzo e della deambulazione.



2. USO PREVISTO

2.1 INDICAZIONI TERAPEUTICHE

SBI FRAME

Stabilizzazione del piede, frattura della caviglia, gravi distorsioni della caviglia, frattura del metatarso, uso post-operatorio.

SBI MOTUS

Stabilizzazione del piede, scarico dell'ulcera/ferita diabetica plantare, scarico dell'ulcera/ferita plantare di avampiede e mesopiede, ferita post chirurgica ed altre ferite.

SBI W-HEEL

Gestione della ferita/ulcera del tallone.

2.2 LIMITAZIONI

Il prodotto presenta le limitazioni che derivano dall'uso specifico e dalle caratteristiche dei materiali impiegati. In caso di variazioni strutturali del dispositivo o induzione ad alterazioni negative della deambulazione, sospendere l'uso del dispositivo e contattare il medico. Il prodotto può essere utilizzato unicamente da soggetti **fino a 130 kg di peso corporeo**.

3. LIMITI DI RESPONSABILITÀ

3.1 GENERALITÀ

La produzione è conforme allo stato dell'arte, secondo quanto attualmente conosciuto e divulgato a livello tecnico scientifico. La ditta Optima Molliter S.r.l. non si assume alcuna responsabilità nel caso di utilizzo del prodotto nelle condizioni di seguito elencate come uso improprio.

3.2 USO IMPROPRIO

Per uso improprio si intende l'utilizzo del prodotto nelle seguenti condizioni:

- mancata osservanza delle indicazioni terapeutiche;
- mancata osservanza delle prescrizioni e delle indicazioni del produttore;
- mancato rispetto o uso contrario alle vigenti norme di sicurezza;
- significativa alterazione delle dimensioni;
- significativa alterazione della struttura con modifica/aggiunta di elementi;
- adattamento del prodotto con significativa alterazione della forma;
- uso sportivo anche ridotto;
- pulizia con prodotti non idonei;
- conservazione non idonea;
- abuso del prodotto;
- guida di automezzi durante l'utilizzo dei prodotti SBI;
- montaggio o smontaggio dei componenti del dispositivo effettuato da personale non qualificato;
- mancata osservanza delle istruzioni di montaggio o smontaggio;
- deambulazione senza la suola di SBI.

4. ISTRUZIONI D'USO

4.1 GENERALITÀ

SBI Motus, SBI Frame o SBI W-Heel mantengono le proprie caratteristiche quando correttamente utilizzati e conservati nell'arco del loro ciclo vitale (mediamente 6 mesi), secondo le caratteristiche ambientali ed il loro utilizzo. I prodotti possono essere utilizzati direttamente oppure con le apposite modifiche ai plantari così come espressamente indicato. È importante non modificare la struttura ed i previsti punti di sostegno per non alterare la funzionalità dei prodotti. Non sono note controindicazioni.

4.2 PULIZIA E CONSERVAZIONE DEL PRODOTTO

- Supporto rigido (1): in lavastoviglie (temperatura massima 45°) o a mano utilizzando sapone neutro e risciacquo con acqua fredda;
- Rivestimenti morbidi (2-2a), Suola (5-5a), Rinforzo Tibiale (3): utilizzare acqua fredda e pulire con sapone neutro, risciacquare una volta completata l'operazione;
- Cinghie (4), Fibbie (8), Calza (11): lavatrice in acqua fredda;
- Bottoni a Vite (7) ed Elementi Dado (7.1): una volta rimossi, vanno puliti con un panno morbido ed apposito prodotto per pulizia acciaio zincato (bottoni a vite) ed apposito prodotto per ferro zincato (elementi dado);
- evitare qualunque liquido aggressivo come alcool, candeggina, ammoniaca, solventi, perossidi e sbiancanti ottici;
- evitare l'utilizzo di gomme abrasive, come spazzole, lana d'acciaio, carta vetro e lame di coltello per l'eliminazione delle macchie. La ditta Optima Molliter S.r.l. non è responsabile di danni provocati da prodotti abrasivi, che aggrediscono i materiali e da esposizione diretta a fonti di calore;
- asciugare a mano con panno morbido o all'aria lontano da fonti di calore e sole diretto;
- non utilizzare asciugatori o macchine asciugatrici.



1 Unità principale AFO SBI Motus, SBI Frame o AFO open (SBI W-Heel) in PP

1a/1b Bottoni di estrazione

2 Tomaia morbida in E.V.A.

2a Protezione tibiale morbida in E.V.A.

3 Rinforzo tibiale semi rigido in TPU

4 Cinturini a Strap

5 Suola Fully Rocking (SBI Motus/SBI W-Heel)

5a Suola Rocker (SBI Frame)

5b/5c Punti di blocco suola anteriori

6 NRS-Sistema di Non Removibilità (SBI Motus)

7 Bottoni a vite

7.1 Elemento dado

8 Fibbie

9 KIT 3*3

10 PLTM

11 Calza Protettiva

5. ELIMINAZIONE DEL PRODOTTO

I materiali assemblati nei prodotti SBI Motus, SBI Frame e SBI W-Heel sono del tipo parzialmente ecologico e pertanto necessitano di alcuni accorgimenti, nel caso di eliminazione del prodotto. Si raccomanda di non disperdere il prodotto nell'ambiente. Verificare le normative italiane e locali per lo smaltimento dei prodotti inerti e plastici. Le parti in PP e ABS sono riciclabili al 100% e smaltibili insieme alla plastica. Il packaging può essere smaltito nella plastica (sacchetti in nylon) e nella carta (parti in carta).

6. DATI DI IDENTIFICAZIONE DEL PRODOTTO

DATI TECNICI e PARAMETRI

Anno e luogo di produzione	2020 Made in Italy
Produttore e responsabile dell'immissione in commercio	Optima Molliter srl - Via Breda 19/21 Civitanova Marche (Mc) Italy

DIMENSIONI

SBI MOTUS	S	260x120x335	M	285x128x350
SBI W-HEEL	L	300x135x345	XL	320x143x360
	XXL	340x158x375		
SBI FRAME	S	260x120x330	M	285x128x340
	L	300x135x350	XL	320x143x360
	XXL	340x158x375		

Peso Netto	S	0.77	M	0.87	L	1.05
SBI MOTUS	XL	1.15	XXL	1.26		

Peso Netto	S	0.76	M	0.86	L	1.03
SBI FRAME	XL	1.16	XXL	1.25		

Peso Netto	S	0.74	M	0.85	L	1.03
SBI W-HEEL	XL	1.13	XXL	1.27		

Classifica del Prodotto	classe I Direttiva 93/42 CEE
-------------------------	------------------------------

TAGLIA AMBIDESTRO	MISURE: S (small) M (medium), L (large) XL (extra large) XXL (extra extra large) EUR: S 34-36, M 37-39, L 40-42, XL 43-45, XXL 46-48
----------------------	--

Lotto di Produzione	Come descritto sull'etichetta all'interno di ogni unità principale AFO o AFO OPEN
---------------------	--

Materiali utilizzati SBI	Protezione Tibiale semi rigida e Fibbie (TPU), Tomaia, Protezione tibiale morbida e plantari (E.V.A.), AFO ed AFO Open (PP), Viti in acciaio zincato, Dadi in ferro zincato, Suola (E.V.A.+Nylon), Velcro (Poliammide+Poliestere), Calza Protettiva (90% Cotone, 7% Poliammide, 3% Elastam)
--------------------------	---

Packaging	Peso gr 106 Materiale: Cartone + Nylon
-----------	--

I prodotti SBI sono Latex Free

7. GARANZIA

La garanzia prestata, riferita ai soli vizi dei materiali impiegati ed ai soli difetti di fabbricazione, protegge i prodotti a norma di legge. Optima Molliter S.r.l. sostituirà il prodotto o parte di esso o i suoi accessori entro sei (6) mesi dalla data di acquisto qualora ci siano difetti di fabbricazione. La garanzia prestata non ha effetto in caso di:

- danni provocati dal trasporto e non contestati dall'acquirente al vettore al momento della consegna;
- riparazioni effettuate da soggetti diversi dal produttore;
- normale usura del prodotto;
- danni imputabili a colpa dell'acquirente, in conseguenza di un uso scorretto e/o improprio del prodotto, di una errata manutenzione o di negligenza nella conservazione dello stesso.

7.1 SISTEMA DI RESTITUZIONE

L'articolo, che si assume essere difettato, potrà essere restituito dal rivenditore o dal cliente solo previa autorizzazione della Optima Molliter S.r.l., alla quale dovrà essere inviata unitamente alla confezione originale ed alla prova di acquisto, ed esclusivamente in porto franco. Salvo caso di eventuale e riconosciuta responsabilità dell'Azienda, il prodotto sarà restituito dall'Azienda al rivenditore o al cliente.

8. PREPARAZIONE DI SBI

8.1 APPLICAZIONE DI SBI

- Aprire gli strap e rimuovere il linguettone anteriore (fig. A);
- indossare la calza protettiva inclusa nel tutore (11 **Protective Sock**);
- una volta seduto inserisci il piede nel tutore posizionando il tallone nella parte posteriore di SBI (fig. A). Posiziona il linguettone (protezione tibiale 2a+3) sopra al dorso del piede e gamba facendo attenzione che la scritta SBI sia posizionata come nel disegno in corrispondenza delle dita (fig. B). Chiudi gli Strap nell'ordine indicato dal n. I al n.IV facendo attenzione ad inserirli nelle apposite feritoie Ia-IIa-IIIa-IVa (fig. C).

Fig. A



Fig. B



Fig. C



8.2 APPLICAZIONE DEL SISTEMA DI NON REMOVIBILITÀ (NRS)

- L'indicazione alla Non Removibilità del Tutore SBI Motus spetta unicamente al medico specialista prescrittore del presidio dopo aver valutato le condizioni cliniche del paziente;
- il Sistema di Non Removibilità NRS deve essere applicato unicamente dal medico Specialista o dall'Operatore Sanitario Abilitato; è consigliabile separare l'unità principale AFO (1) dal resto del tutore prima di inserire la fascetta di Non Removibilità NRS;
- ogni Tutore **SBI Motus** contiene nella confezione N.1 NRS monouso (6);
- dividere la fascetta in due parti longitudinalmente, inserire la prima fascetta nell'apposita feritoia laterale del tutore indicata dalla sigla NRS (fig. D). Inserire la seconda fascetta nella feritoia opposta del tutore indicante la sigla NRS e chiudere il primo bottone (fig. E-F). Successivamente chiudere il secondo bottone (fig. G);
- scrivere con un pennarello indelebile la data di applicazione nell'apposito spazio sulla fascetta NRS;
- il sistema NRS deve essere rimosso al massimo entro 7gg e sostituito.

Fig. D



Fig. E



Fig. F



Fig. G



8.3 MONTARE E SOSTITUIRE LA SUOLA DI SBI FRAME, SBI MOTUS E SBI W-HEEL

ATTENZIONE: Le Suole di SBI Frame, SBI Motus e SBI W-Heel possono essere montate, smontate e sostituite dall'unità principale in modo semplice e veloce. Tuttavia è importante non sottovalutare i pericoli derivanti da un uso scorretto del sistema. Prima di rimuovere la suola di SBI leggere attentamente le seguenti istruzioni.

ATTENZIONE: Non camminare mai senza la suola di SBI Frame, SBI Motus e SBI W-Heel. Camminare senza la suola di SBI Frame, SBI Motus e SBI W-Heel è estremamente pericoloso e causerebbe cadute ed eventi avversi.

RIMOZIONE DELLA SUOLA: Premere contemporaneamente con la stessa mano i due pulsanti di sblocco 1a ed 1b (fig. H), tirare quindi con l'altra mano la suola verso il basso. A questo punto i punti di blocco anteriori saranno facilmente liberati.

Fig. H



MONTARE LA SUOLA: Posizionare la suola su una superficie piana, inserire i connettori della punta del corpo principale AFO o AFO OPEN nei due punti di blocco anteriori (1c/1d) nelle apposite feritoie della suola (fig. L), a questo punto premere SBI Frame, SBI Motus o SBI W-Heel verso la suola fino a sentire due “click” (fig. M). Assicurarsi quindi che la suola sia ancorata saldamente ad SBI. Pericolo di scivolamento in presenza di superfici bagnate!

Fig. L

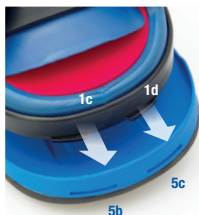


Fig. M



9. ISTRUZIONI PER IL TECNICO ORTOPEDICO O PERSONALE SANITARIO ABILITATO

9.1 SMONTARE E MONTARE BOTTONI A VITE E FIBBIE DI SBI

ATTENZIONE: I Bottoni a vite (7-7.1) e Fibbie (8) di SBI possono essere sganciati dall'unità principale (1) (fig. R) e riposizionati nelle apposite sedi (fig. N) in modo semplice e veloce. Tuttavia è importante non sottovalutare i pericoli derivanti da un montaggio e smontaggio scorretti. Il montaggio e lo smontaggio delle Fibbie e Bottoni di SBI Frame, SBI Motus e SBI W-Heel dovrebbero essere effettuati da personale qualificato come il Tecnico Ortopedico o personale sanitario abilitato. Prima di sganciare i Bottoni a vite e le Fibbie leggere attentamente le seguenti istruzioni.

SMONTARE E MONTARE I BOTTONI A VITE DI SBI FRAME, SBI MOTUS E

SBI W-HEEL: Ogni Tutore SBI Frame, SBI Motus e SBI W-Heel ha in dotazione 8 bottoni a vite e 8 elementi dado.

SMONTARE IL BOTTONE A VITE DI SBI FRAME, SBI MOTUS E SBI W-HEEL:

Rimuovere tutta la parte superiore morbida e la suola di SBI Frame, SBI Motus e SBI W-Heel. Utilizzare un cacciavite (per svitare o avvitare la vite 7) ed una pinza (per bloccare l'elemento interno femmina 7.1). Girare il cacciavite in senso antiorario finché la parte esterna del bottone a vite non si separa dalla parte interna (fig. Q).

MONTARE IL BOTTONE A VITE DI SBI FRAME, SBI MOTUS E SBI W-HEEL: Rimuovere tutta la parte superiore morbida e la suola di SBI Frame, SBI Motus e SBI W-Heel. Inserire la parte maschio 7 nella apposita sede della fibbia 8 e posizionarla nella parte esterna del supporto rigido 1 (fig. O). Successivamente inserire l'elemento dado femmina (7.1) nella parte interna del supporto rigido 1 (fig. P). Bloccare con una chiave a quattro denti la parte femmina e girare con il cacciavite il bottone a vite maschio esterno (7) sino a bloccare i due elementi (fig. Q).

ATTENZIONE: Il Bottone a Vite è realizzato in materiale metallico, avvitare bene le due parti facendo attenzione a non danneggiare la filettatura o le teste del Bottone a vite.

SMONTARE E MONTARE LE FIBBIE SBI: Ogni SBI Frame, SBI Motus e SBI W-Heel ha in dotazione 8 "Fibbie" (8). Per facilitare la procedura si consiglia di rimuovere la suola di SBI Frame, SBI Motus e SBI W-Heel.



Fig. N



Fig. O

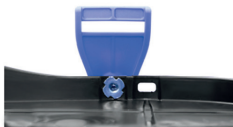


Fig. P



Fig. Q



Fig. R

MONTARE LA FIBBIA DI SBI FRAME, SBI MOTUS E SBI W-HEEL: Vedere procedura **SMONTARE E MONTARE BOTTONI A VITE** di SBI Frame, SBI Motus e SBI W-Heel.

9.2 SMONTARE E RIMONTARE IL RINFORZO TIBIALE DALLA PROTEZIONE TIBIALE

Il Rinforzo Tibiale Semirigido di SBI Frame, SBI Motus e SBI W-Heel (3) può essere facilmente smontato e rimontato dalla Protezione Tibiale in materiale morbido Blu (2a) tramite un sistema a Bottoni a clips. Per smontare, sganciare i 3 bottoni posizionati sul rinforzo. Per rimontarlo è sufficiente riposizionarlo facendo attenzione al verso (la parte con la scritta "SBI" deve trovarsi in corrispondenza delle dita del piede) e riagganciare i 3 bottoni (fig. S).

Fig. S



9.3 PERSONALIZZAZIONE DEL KIT 3*3

Il sistema modulare **KIT 3*3** di serie su SBI Motus e SBI W-Heel ed opzionale su SBI Frame, è stato progettato per redistribuire le pressioni plantari e gestire le ulcere/lesioni da pressione dell'avampiede, mesopiede e tallone.

ATTENZIONE: **KIT 3*3** deve essere personalizzato unicamente da medici, infermieri, tecnici ortopedici o personale sanitario qualificato.

ATTENZIONE: **KIT 3*3** deve essere utilizzato unicamente all'interno di **SBI Motus** (1 kit è già di serie), **SBI W-Heel** (1 kit è già di serie), **SBI Frame** (optional). Non utilizzare mai **KIT 3*3** in normali calzature o su altri tutori. Optima Molliter S.r.l. non è responsabile dell'utilizzo di **KIT 3*3** in dispositivi differenti da SBI Frame, SBI Motus o SBI W-Heel.

ATTENZIONE: **KIT 3*3** deve essere sempre utilizzato nel suo insieme con tutti i suoi componenti ben connessi tra loro all'interno del tutore SBI.

1. **KIT 3*3** (9) è composto da 9 parti connesse tra loro con un sistema a Puzzle che forma 3 solette plantari distinte;
2. le tre solette plantari hanno 3 distinte densità (rossa=morbida, beige=media, blu=rigida) e possono essere combinate verticalmente ed orizzontalmente. La pressione plantare può essere redistribuita semplicemente combinando tra loro le parti. La procedura può essere fatta con semplici passaggi;
3. per diminuire la pressione su un'area ulcerata/lesionata **KIT 3*3** può essere personalizzato facendo una marcatura e tagliando parte delle solette plantari:

A. PAZIENTE SOTTO I 90 KG DI PESO

(Marcare il punto plantare ulcerato/lesionato sulla soletta di colore BEIGE).

1. coprire la lesione/ulcera plantare con un film sterile trasparente e tramite un rossetto o apposito pennarello da marcatura debile marcare il perimetro della lesione/ulcera direttamente sopra al film trasparente (fig.T.1);
2. inserire tutto il **KIT 3*3** di plantari nel tutore ed assicurarsi che il plantare di colore BEIGE sia a contatto con il piede (BEIGE-ROSSO-BLU);
3. calzare il piede del paziente nel tutore, posizionare il linguettone tibiale e chiudere i 4 cinturini a Strap. Aiutare il paziente a fare una camminata (10 passi). In questo modo la superficie plantare sarà marcata nel punto della lesione;
4. ora, aprire il tutore e rimuovere l'intero **KIT 3*3**;
5. marcare con una penna il perimetro dell'impronta con una abbondanza di circa 6 mm intorno e 8 mm davanti (fig. T.2a);
6. tramite un bisturi con lama da 10 mm perforare il perimetro della marcatura con una inclinazione della lama a 45° circa (fig. T.2b);
7. assemblare i componenti a seconda della redistribuzione di pressione voluta (vedere Diagramma A) ed inserire tutto **KIT 3*3** nel Tutore SBI;
8. assicurarsi che la soletta con il buco sia nel segmento intermedio;

ATTENZIONE: LE ZONE CON IL BUCO DI SCARICO NON VANNO MAI A CONTATTO CON L'ULCERA/LESIONE PLANTARE.

9. per evitare infezioni, proteggere sempre l'ulcera/lesione con adeguate medicazioni prima di utilizzare **KIT 3*3**;
10. dopo aver applicato la **Calza protettiva** (11), in dotazione in ogni SBI, il tutore SBI può ora essere calzato dal paziente.

ATTENZIONE: NON UTILIZZARE MAI IL TUTORE SBI SENZA LA CALZA PROTETTIVA PROTECTIVE SOCK (11).

B. PAZIENTE SOPRA I 90 KG DI PESO

(Marcare il punto plantare ulcerato/lesionato sulla soletta di colore BLU).

1. coprire la lesione/ulcera plantare con un film sterile trasparente e tramite un rossetto o apposito pennarello da marcatura delebile marcare il perimetro della lesione/ulcera direttamente sopra al film trasparente (fig.T.1);
2. inserire tutto il KIT 3*3 di plantari nel tutore ed assicurarsi che il plantare di colore BLU sia a contatto con il piede (BLU-BEIGE-ROSSO);
3. calzare il piede del paziente nel tutore, posizionare il linguettone tibiale e chiudere i 4 cinturini a Strap. Aiutare il paziente a fare una camminata (10 passi). In questo modo la superficie plantare sarà marcata nel punto della lesione;
4. ora, aprire il tutore e rimuovere l'intero **KIT 3*3**;
5. marcare con una penna il perimetro dell'impronta con una abbondanza di circa 6 mm intorno e 8 mm davanti (fig. T.3a);
6. tramite un bisturi con lama da 10 mm perforare sul plantare BLU il perimetro della marcatura con una inclinazione della lama a 45° circa (fig. T.3b);
7. posizionare la parte forata BLU sopra la corrispondente parte BEIGE. Marcare con una penna la base del foro conico. Effettuare quindi un foro conico anche sul plantare BEIGE (fig. T.3c);
8. assemblare i componenti a seconda della redistribuzione di pressione voluta (vedere Diagramma B) ed inserire tutto il **KIT 3*3** nel Tutore SBI;
9. assicurarsi che la soletta BLU sia nel segmento intermedio e che la soletta BEIGE sia nel segmento sotto;

ATTENZIONE: LE ZONE CON IL BUCO DI SCARICO NON VANNO MAI A CONTATTO CON L'ULCERA/LESIONE PLANTARE.

10. dopo aver applicato la **Calza Protettiva** (11), in dotazione in ogni SBI, il tutore SBI può ora essere calzato dal paziente.

ATTENZIONE: NON UTILIZZARE MAI IL TUTORE SBI senza il plantare in dotazione e la calza protettiva **Protective Sock** (11).

ATTENZIONE: KIT 3*3 DEVE ESSERE SOSTITUITO COMPLETAMENTE ogni 21 giorni dietro prescrizione del medico specialista (qualora l'ulcera/lesione non fosse ancora guarita).

Per ulteriori informazioni richiedi il video del modo d'uso al seguente indirizzo email:
info@optimamolliter.com

Fig. T

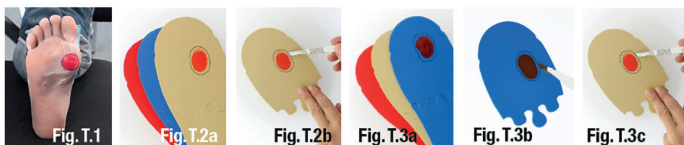


DIAGRAMMA A

PERSONALIZZAZIONE SU PAZIENTE SOTTO I 90 KG


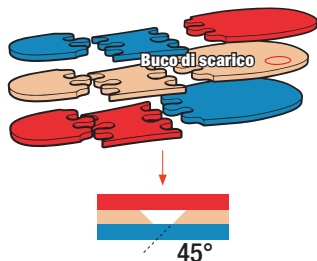


DIAGRAMMA B

PERSONALIZZAZIONE SU PAZIENTE SOPRA I 90 KG

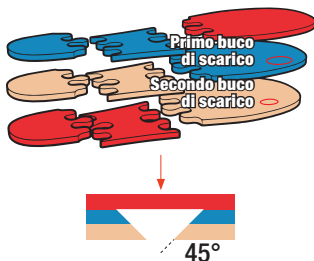

9.4 PREPARAZIONE DEL PLANTARE PLTM


ATTENZIONE: PLTM deve essere prescritto unicamente dal Medico Specialista e personalizzato unicamente da medici, infermieri, tecnici ortopedici o personale sanitario qualificato.

ATTENZIONE: PLTM deve essere utilizzato unicamente all'interno di **SBI Motus** (optional), **SBI W-Heel** (optional), **SBI Frame** (optional). Non utilizzare mai **PLTM** in normali calzature o su altri tutori. Optima Molliter S.r.l. non è responsabile dell'utilizzo di **PLTM** in dispositivi differenti da SBI.

PLTM è stato progettato per il decorso post-operatorio dopo l'amputazione delle dita del piede o amputazione trans metatarsale.

1. Rimuovere l'adesivo sulla fascetta di velcro di colore nero ed attaccarla sulla superficie interna del plantare;
2. attaccare dalla parte del velcro il materiale arancione sulla fascetta di velcro;
3. posizionare il piede con minore amputazione sul plantare facendo attenzione che tra il piede ed il materiale arancione ci sia almeno 1,5 cm di spazio (fig. U);
4. proteggere sempre il piede e la gamba con medicazioni adeguate. Sopra le medicazioni indossare la calza protettiva in dotazione in ogni tutore.

Fig. U

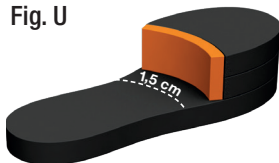



PERSONALIZZAZIONE PLANTARI

GUIDA AL CORRETTO SCARICO PLANTARE




PIEDE/FERITA

PLANTARE 1

PLANTARE 2

PLANTARE 3

Paziente < 90 Kg

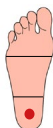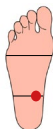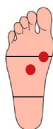

GUIDA AL CORRETTO SCARICO PLANTARE


PIEDE/FERITA

PLANTARE 1

PLANTARE 2

PLANTARE 3

Paziente ≥ 90 Kg

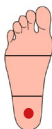

PUNTI CHIAVE

La ferita è sempre collocata sopra il plantare rosso

Per il paziente con un peso < 90 Kg effettuate 1 foro

Per il paziente con un peso ≥ 90 Kg effettuate 2 fori

Scegli sempre una misura in più rispetto a quella usuale del paziente

5 misure: S (34-35-36), M (37-38-39), L (40-41-42), XL (43-44-45), XXL (46-47-48)

Durezza dei plantari: **Rosso: morbido**

Beige: mediamente duro

Blu: molto duro

Tutti gli articoli sono dispositivi medici di
Classe I secondo la Direttiva 93/42 CEE
ssimm.



Optima Molliter

Company Certified under:

UNI EN ISO 9001:2008 Certificate N° IT249551
and UNI EN ISO 13485:2012 Certificate N° IT249550

Via Breda 19/21

62012 Civitanova Marche (MC)

T +39 0733 801060 • F +39 0733 801048

info@optimamolliter.com

www.optimamolliter.com